

Bactéricide Virucide Fongicide auto percutant ALTOGERM SICO

Le Bactéricide Virucide Fongicide auto percutant ALTOGERM SICO.



Référence : SICA22421

Prix : 7.95€

Description

Bactéricide Virucide Fongicide auto percutant unidose SICO Assainissant et destructeur d'odeurs air et surfaces de 150ml USAGE PROFESSIONNEL

Le **Bactéricide auto percutant unidose SICO** est un **bactéricide détruisant les odeurs putrides, miasmes, et microbes.**

Utilisé en **usage préventif** ou durant les périodes de maladies telles que : grippe, rubéole, rougeole, varicelle, coqueluche, scarlatine, pneumonie, rhino pharyngite. Contact alimentaire indirect.

Propriétés microbiologiques du Bactéricide auto percutant unidose SICO :

- Son efficacité bactéricide a été testée selon la norme Européenne EN 1276 en 5min à 20°C sur les bactéries particulièrement résistantes : bacille pyocyannique (*Pseudomonas aeruginosa*), colibacille (*Escherichia coli*) staphylocoque doré (*Staphylococcus aureus*), *Enterococcus hirae*...
- Son efficacité fongicide a été testée selon la norme EN 1650 en 15 minutes à 20°C sur *Candida albicans* et *Aspergillus niger*
- Effet virucide sur H7N1 en 30 minutes à 20°C selon EN 14476 et sur HIV et hépatite B en 2min à 20°C.

Application du Bactéricide Virucide Fongicide auto percutant unidose SICO :
Pour l'assainissement de l'atmosphère dans de multiples lieux tels que les écoles, salles de soins, laboratoire, voiture, vestiaire, sanitaire...

Pour la décontamination des surfaces, du matériel médical, des toilettes, etc... toute application devra être suivie par un rinçage de la surface décontaminée.

Mode d'emploi du Bactéricide Virucide Fongicide auto percutant ALTOGERM SICO :
Enclencher le diffuseur - Sortir de la pièce immédiatement Le produit se libère automatiquement et en totalité. Aérer 30 minutes avant de réintégrer les locaux

Fiche Technique

Mode d'emploi du Bactéricide auto percutant unidose SICO : Enclencher le diffuseur - Sortir de la pièce immédiatement Le produit se libère automatiquement et en totalité. Aérer 30 minutes avant de réintégrer les locaux Pour l'assainissement de l'atmosphère, un aérosol permet de traiter 50 à 150 m³

Conditionnement du Bactéricide auto percutant unidose SICO : Boîtier fer blanc diamètre 52 mm/hauteur 105 mm Volume nominal 210 ml/volume net 150 ml

[Lien vers la fiche du produit](#)