


Le fauteuil No Stress est équipé de modules
de couette zippés amovibles et lavables .

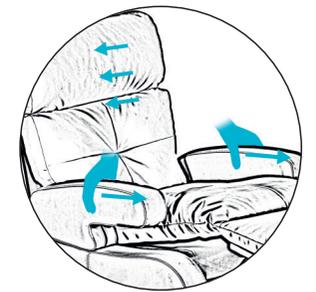


Option :
Oreiller connecté
Hifinnov' allie confort
& son exceptionnel




POUR L'INCLINER EN POSITION TV

- Posez vos mains au milieu des deux accoudoirs (coudes fléchis), serrez les accoudoirs avec vos mains.
- Poussez avec vos mains (serrées sur les accoudoirs) vers l'avant et dans le même temps appuyez sur le dossier avec votre dos.

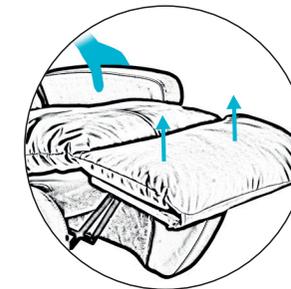

POUR L'INCLINER EN POSITION REPOS

- Levez légèrement les jambes afin de libérer la bascule du dossier.
- Appuyez sur le dossier avec votre dos.

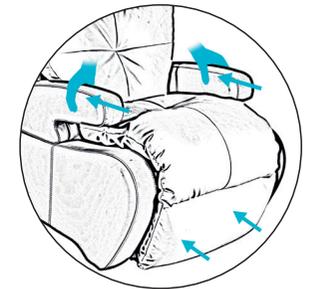

POUR REVENIR EN POSITION ASSIS

- Passez au préalable par la position REPOS
- Puis posez vos mains sur les deux accoudoirs (bras tendus), serrez les accoudoirs avec vos mains.
- Tirez vers vous avec vos mains serrées (le plus loin possible) sur les accoudoirs et dans le même temps appuyez sur le repose jambes avec vos mollets.

*Laissez vous envelopper
par cette bulle de bien-être*

