

Echelle à main de Parinaud COMED

L'échelle à main de Parinaud COMED permet le test visuel rapproché personne lettré ou illettré.



Marque : COMED

Référence : 3282000

Prix : 33.50€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Test d'acuité visuel de Parinaud lettré, Test d'acuité visuel de Parinaud illettré

Description

Echelle à main de Parinaud COMED : Echelle à main de Parinaud COMED

L'échelle à main de Parinaud COMED permet le test visuel rapproché dit de Parinaud pour personne lettré ou illettré, l'échelle est composée d'une plaque blanche avec lettrage et symboles et une poignée en Plexiglass transparent.

Plaque en PVC blanc 1 000g/m² avec un manche en plexiglass Dimension : 221 x 135

L'Echelle à main de Parinaud COMED est disponible en version : Test d'acuité visuel de Parinaud lettré Test d'acuité visuel de Parinaud illettré

Comment utilisé L'Echelle à main de Parinaud COMED :

Tester auparavant la vision de votre patient en mode binoculaire puis procéder successivement oeil après oeil en masquant l'oeil non testé par un objet opaque.

Faites le test de Parinaud à bras tendu du patient à 33cm. Le test détermine la vitesse de lecture sans changement


de distance, l'information donnée est plus qualitative que quantitative. Si vous devez déplacer vers l'avant ou l'arrière le test pendant la lecture ceci peut caractériser une myopie ou une hypermétropie.

Ne peut être utilisé que par des professionnels ayant reçus une formation spécifique.

Eclairage : Éviter tout éclairage pouvant altérer la vision normal du test. Vérifier que l'échelle soit bien à plat sur le mur sans angle.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

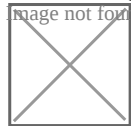

[Lien vers la fiche du produit](#)