

K-tape Lymph SISSEL

Le K-tape Lymph SISSEL est une bande de thérapie sans médicament.



Marque : SISSEL

Référence : 2850

Points de fidélité offerts : 8

Prix : 19.92€

Description

Bande K-tape Lymph SISSEL : K-tape 20 bandes de 50 x 250 mm

Le K-tape Lymph SISSEL utilisé en **kinésithérapie et physiothérapie** est une bande de thérapie sans médicament permettant d'accompagner la guérison de nombreuses maladies et soulageant les douleurs.

Le **K-tape** ou **K-taping** est utilisé tant pour le milieu médical (kinésithérapeutes et physiothérapeutes) que pour les sportifs de haut niveau.

Peut être appliqué sur presque chaque partie du corps en cas d'hématomes, excepté pour les hématomes au visage. Bande élastique en pur coton avec une couche adhésive en acrylate hypoallergénique. Résiste à l'eau, perméable à l'air et peut rester en place plusieurs jours d'affilée.

Mode d'emploi du K-tape Lymph SISSEL :

- Appliquer 30 à 60 minutes avant l'activité sportive
- Ne pas appliquer lors de maladie ou irritations de la peau

- Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes
- Si le Tape est mouillé, sécher le en tamponnant et non en frottant pour éviter un décollement précoce du Tape

Vidéo d'utilisation du K-tape Lymph SISSEL :

Fonctionnement du K-tape for me SISSEL :

A chaque mouvement, le K-tape stimule des récepteurs dans la peau qui transmettent ces stimulations aux muscles, aux capsules articulaires et aux ligaments (effet appelé proprioception).

Le k-tape soulève également les tissus grâce à son élasticité permettant une meilleure circulation sanguine et lymphatique.

[Pour en savoir plus sur le K-taping.](#)

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)