

Pince Michel ôte agrafes SPENGLER

Pince Michel ôte agrafes permettant de retirer facilement les agrafes.



Marque :SPENGLER

Référence :I16-082-130

Points de fidélité offerts :10

Prix :6.75€

Description

Pince ôte agrafes SPENGLER

Pince Michel ôte agrafes en acier inoxydable

La pince Michel ôte agrafes SPENGLER est une pince en acier inoxydable utilisé en médecine pour retirer facilement les agrafes de la peau.

Comment utiliser la pince michel ôte agrafes : Ouvrir la pince de Michel et la glisser sous l'agrafes.
Refermer doucement la pince, ce qui fait plier l'agrafe en son milieu et relever les griffes hors de la peau.

[Lien vers la fiche du produit](#)