

## Pressothérapie semi-professionnel Drain'Confort XTP03 EUREDUC

Pressothérapie semi-professionnel pour la récupération sportive.



**Marque :** EUREDUC

**Référence :** XTP03

**Points de fidélité offerts :** 1299

**Prix :** 989.00€

### Options disponibles :

*OPTION AU CHOIX* : Pressothérapie Drain'Confort TP03 EUREDUC, Pressothérapie Drain'Confort + Manchon (+ 243.00€), Pressothérapie Drain'Confort + Bottes (+ 342.00€)

### Description

Drain'Confort XTP03 EUREDUC Pressothérapie semi-professionnel - récupération sportive

La Pressothérapie semi-professionnel **Drain'Confort XTP03 EUREDUC**, est un appareil de pressothérapie portable pour les particuliers.

Utilisé pour **la récupération musculaire des sportifs** ou pour le traitement de différentes pathologies, il permet d'agir de **soulager les sensations de jambes lourdes**, les **oedèmes-lymphoedèmes-phlèboedèmes**, etc...

**Réduction de la moitié du temps de récupération musculaire pour les sportifs**



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Issu de la recherche médicale, la **Pressothérapie Drain'Confort XTP03** opère un massage par le gonflage pneumatiques des bottes ou du manchon selon la partie du corps à traiter. La circulation du sang et de la lymphe est ainsi activée, mieux diffusés, la partie traitée s'oxygène plus vite et véhiculent avec plus de facilité les toxines. Les impuretés sont ainsi drainées et éliminées.

Caractéristiques

Mode de régulation de la pression :

**Double Gradient de Pression Automatique (D.G.P.A. – Brevet International)**

Pression : Réglable : 10-99 mmHg (13,5 – 132 mB)

Durée du cycle :

La durée fluctue de 65 à 115 secondes, selon la taille du membre à traiter et le niveau de pression programmée

Gonflage des éléments :

2 rangées de 3 sorties permettent le gonflage de 1 ou 2 éléments simultanément

Le Pressothérapie dispose de 7 phases :

Phase a : Gonflage de la chambre 1

Phase b : Temps de travail de 4s. La chambre 1 restera gonflée jusqu'en fin de phase f

Phase c : Gonflage de la chambre 2 + supplément de pression dans la chambre 1

Phase d : Temps de travail de 4s. La chambre 2 restera gonflée jusqu'en fin de phase f

Phase e : Gonflage de la chambre 3 + suppléments de pression dans les chambres 1 et 2

Phase f : Temps de travail de 3s

Phase g : Dégonflage des 3 chambres et repos : 12s

Trois modèles de XTP03 disponible : **Pressothérapie Drain'Confort XTP03 EUREDUC (seul) = 989€**

?

**Pressothérapie Drain'Confort XTP03 EUREDUC + Manchon = 1232€**

1 appareil de Pressothérapie Drain'Confort

1 manchon : 3 chambres

10 gaines

Valise de transport

1 mode d'emploi

## Pressothérapie Drain'Confort XTP03 EUREDUC + Bottes = 1331€

1 appareil de Pressothérapie Drain'Confort

2 bottes : 3 chambres (diamètre de 80 cm - hauteur 92 cm)

10 gaines

Valise de transport

1 mode d'emploi

### Les Partenaires utilisant la Pressothérapie Drain'Confort XTP03 EUREDUC :



Fédération Française de Hockey



[Pour en savoir plus sur la pressothérapie](#)

### Fabriqué en France



### Fiche technique

Caractéristiques Techniques du Pressothérapie Drain'Confort EUREDUC : Poids : 1.9 kg Puissance : 24 W

Intensité sonore : 44 dB

### Fiche d'utilisation

Indications d'utilisation du Pressothérapie Drain'Confort EUREDUC :

Indications :

OEdèmes des membres : Lymphoedème - Phléboedème Prévention de la thrombose – séquelles de phlébite  
Problèmes circulatoires Jambes lourdes Récupération post-chirurgical Remodelage corporel

Contre indications :

Maladies variqueuses, artériopathies évoluées Hypertension Infections locales, dermatoses Problèmes cardiaques Phlébites Toute autre contre indication d'ordre médical Les patients souffrant d'un de ces troubles demanderont l'avis de leur médecin traitant

### **Télécharger la Fiche Technique**

Image not found or type unknown



### **Télécharger la Fiche d'Utilisation**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)