

Tampons alcoolisés ALCOMED

Les Tampons alcoolisés ALCOMED sont des tampons imprégnés d'alcool permettant de désinfecter la peau avant une injection.



Marque : COMED

Référence : 1731000

Points de fidélité offerts : 2

Prix : 1.95€

Description

Tampons alcoolisés ALCOMED

Tampons alcoolisés Alcomed boîte de 100 sachets individuels

Les Tampons alcoolisés ALCOMED sont des tampons imprégnés d'alcool isopropylique à 70%.

Ces **Tampons alcoolisés ALCOMED** permettent une désinfection rapide et efficace, ils s'utilisent pour désinfecter la peau avant une injection.

Mode d'emploi du Tampon alcoolisé ALCOMED Déchirer le sachet individuel en suivant le pointillé. Retirer la lingette. Frotter légèrement sur la peau pour la désinfecter. Ne pas déplier le tampon, afin d'assurer une humidification plus importante et plus longue.


Fiche technique

Précaution d'emploi du Tampon alcoolisé COMED : Ne pas apposer sur une plaie ouverte ou suintante, ni sur un orifice naturel du corps. Ne pas s'approcher des yeux, risque d'irritation. Après ouverture à utiliser

rapidement. Attention, vapeur inflammables. Tenir éloigné des étincelles, des flammes et d'une source de chaleur durant l'utilisation et pour le stockage. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown

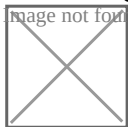

[Lien vers la fiche du produit](#)