

Test Bowie et Dick MEDISTOCK

Le Test de Bowie et Dick MEDISTOCK est un test de contrôle pour autoclaves de classe B qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges poreuses. Vendu par carton de 20.



Marque : MEDISTOCK

Référence : MEDE5100

Points de fidélité offerts : 74

Prix : 54.90€

Description

Test Bowie et Dick MEDISTOCK Test de contrôle pour autoclaves de classe B uniquement

Test Bowie et Dick EURONDA, pour le contrôle du bon fonctionnement des stérilisateurs à vapeur d'eau et tester sa capacité à **stériliser les objets poreux** (compresse, champs, blouses).

Test à usage unique : 134°C -3,5mm

Utilisations du test de bowie & dick :

Utilisable uniquement en **autoclaves à cycles de type B** (à charges poreuses) selon la **norme européenne EN13060**.

Placer le test de bowie & dick au centre de votre autoclave sur l'étagère la plus basse. Le test se compose d'un papier imprimé entouré de 5 feuilles de cellulose de chaque côté ainsi que la boîte en carton. Le tout va en

entier à l'intérieur de votre auto-clave. La pastille jaune devient noir à la fin du test.

Conditionnement : Carton de 20 tests.

[Lien vers la fiche du produit](#)